

# AC50 mask

---



Barriärmask med dokumenterad effekt mot Corona-virus (Covid-19).

Den utgör en skyddande barriär mot möjlig viral genomträngning i munnen eller näsan hos användaren eller på en person i närheten. Den syftar också till att skydda detta område mot all kontakt med händerna.

- En storlek - vuxen.
- "Plisserad" mask tillverkad av laminerat 2-lagers PES 285 g / m<sup>2</sup> tyg.
- 2 elastiska band för åtdragning och justering på baksidan av huvudet.
- Elastisk i sidan för att täta masken mot ansiktet.
- Justerbar näsklämma.
- Materialet i masken innehåller inga ämnen i nivåer som är kända som farliga för användaren.
- Maximala användningstid är 4 timmar. Masken ska sedan tvättas eller kasseras.

Effektiviteten hos materialet har validerats som nytt och efter 50 tvättar och torkningar. AC50-masken kan tvättas upp till 50 gånger. Tvätta i maskin med konventionellt tvättmedel, utan tillsatser, i minst 30 minuter vid 60°C.

CEN - "European committee for standardization" - publicerade i juni 2020 ett "Workshop Agreement" (CWA 17553) avseende "Community face coverings", som speglar riktlinjerna i den franska standarden AFNOR SPEC S76-001 för barriärmasker. AC50-masken uppfyller och överträffar dessa krav.

[Ladda ner bruksanvisningen här.](#)

AC50-masken är avsedd för användning av friska människor utan kliniska symptom på virusinfektion. Den ersätter inte hygieniska skyddsåtgärder eller regler för fysiskt avstånd.

Denna produkt är varken en medicinsk utrustning i den mening som avses i Förordning EU/2017/745 (kirurgiska masker) eller personlig skyddsutrustning i den mening som avses i Förordning EU/2016/425 (filtreringsmasker av typen FFP2).

AC50-masken är designad enligt AFNOR SPEC S76-001-guiden och uppfyller kraven i den interministeriella franska publikationen daterad 29 mars 2020 för användning som :

1. Mask för icke-sanitär användning av kategori 1-UNS 1:

individuell mask för användning av yrkesutövare i kontakt med allmänheten

(personer som tilldelas positioner eller uppdrag som omfattar regelbunden kontakt med allmänheten).

2. Mask för icke-sanitär användning av kategori 2 - UNS 2 :

mask med kollektivt mål att skydda en hel grupp som bär masken

(personer under yrkesutövning som har tillfällig kontakt med andra personer).

## **Testresultat**

*Krav: Skyddseffektivitet för partiklar på 3  $\mu\text{m}$  > 90% ny och efter tvätt*

Resultat: Ny 92% och efter tvätt 95%

*Krav: Skyddseffektivitet för partiklar på 1  $\mu\text{m}$  > 30% ny och efter tvätt*

Resultat: Ny 92% och efter tvätt 91 %

*Krav: Andningsmotstånd vid 30 liter/minut andningsfrekvens, inandning < 2,4 mbar & utandning < 3 mbar*

Resultat: 0-1 mbar ny och efter tvätt

## Teknisk specifikation

Material : 2 lager PES 285 g/m<sup>2</sup> tyg

Livslängd : Upp till 50 tvättar

Standard : AFNOR SPEC S76-001

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies